

# Gebruiksaanweisung LegholderRX® C€

## Produkt

Röntgendurchlässige Fussstütze für 6 stabile Positionen während Knieoperationen.

## Prüfungen


Der LegholderRX® C€ sollte vor dem Gebrauch auf die Intaktheit der Polsterung und der Unversehrtheit, insbesondere Haftfähigkeit der Velcrogurten überprüft werden.

## Einsatzbereich

Verwendet als Fussstütze bei Knieoperationen meist in Kombination mit einer handelsüblichen Seitenstütze am Oberschenkel. Der LegholderRX® C€ wird unsteril unter die sterile Abdeckung montiert.

## Handhabung

Der LegholderRX® C€ wird mit den mitgelieferten Velcrogurten fest auf den Operationstisch unter den sterilen Tüchern angebunden. Einfädeln Velcro gegen oben.

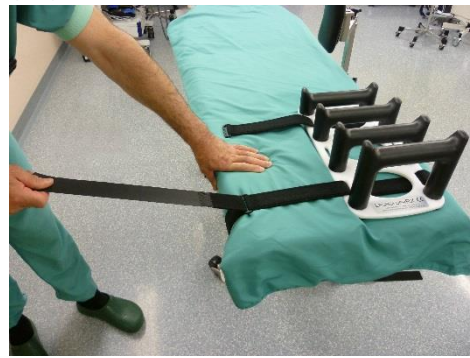

Die proximale Achillessehne liegt auf den höchsten Bügel, die weniger hohen Bügel liegen proximal davon.



Die Seitenstütze sollte so montiert werden, dass sie bei 90° Knieflexion leicht proximal des Kniegelenkes und in der Höhe mit dem oberen Rand der Stütze der Oberschenkel abgestützt wird. Somit erreicht man, dass die Stütze sowohl extensionsnah z. B. beim medialen Aufklappen bei Kniearthroskopien als auch bei starker Flexion wirksam ist.

## Funktionsprüfung

Des LegholderRX® C€

Die Funktionsprüfung beinhaltet die Haftungsfähigkeit der Velcrogurten, die Intaktheit der Polsterung, die stabile Befestigung der Bügel auf der Grundplatte, die Vollständigkeit der 8 Gummipuffer.

Der korrekten Montage  
Siehe Handhabung

## Entsorgung

Normal über den verbrennbaren Abfall oder als Kunststoff Recycling.

## **Materialien**

Hochwertige Kunststoffe, Fussauflage latexfrei

## **Anweisungen zur Aufbereitung:**

Der LegholderRX®C€ braucht keine spezielle Aufbereitung. Da er unter den sterilen Abdecktücher montiert wird braucht es auch keine Sterilisation. In einzelnen Versuchen nahm der LegholderRX®C€ bei Sterilisation bei 134° (Dampfsterilisation) keinen Schaden.

## **Reinigung**

Der LegholderRX®C€ kann mit handelsüblichen Reiniger wie hochprozentigem Alkohol, Flächendesinfektionsmittel, Allzweckreiniger, anionischen und nicht ionischen Tensiden problemlos gereinigt werden. Auch der Einsatz von Jodpräparaten ist unbedenklich, kann aber zu Verfärbungen führen und wird deshalb nicht empfohlen.

## **Wartung**

Der LegholderRX®C€ selber ist wartungsfrei.

## **Kontrolle**

Die Velcrogurten sind einer gewissen Abnutzung unterworfen. Alle 6 Monate empfiehlt es sich die Kontrolle, ob die Gurten noch genügend haften. Ersatzgurten können unter Wirz Orthomechanik, Bernstrasse 1, CH-3076 Worb, Telefon +41 31 832 43 53 oder per Mail: [mechanik@wirz-ortho.ch](mailto:mechanik@wirz-ortho.ch) bestellt werden.

## **Lagerung**

Es empfiehlt sich den LegholderRX®C€ frei auf einer Ablage zu lagern ohne das andere schwere Gegenstände auf ihm liegen. Daraus vermeidet man Verformungen der hochwertigen Polsterung. Temperaturvorgaben bestehen keine.

## **Zusatzinformationen**

Finden Sie auf unserer Homepage: [www.wirz-ortho.ch](http://www.wirz-ortho.ch) (<http://www.wirz-ortho.ch/index.php?id=63>).

## **Gewährleistung**

Das Produkt wird aus hochwertigen Materialien hergestellt und wird vor der Auslieferung eine Qualitätsprüfung unterzogen. Sollten dennoch Fehler auftreten, wenden Sie sich an uns unten genannten Hersteller bzw. Vertreiber oder an Ihren persönlichen Vertriebspartner.

## **Komplikationen**

Komplikationen mit dem LegholderRX®C€ sind keine bekannt.

## **Haftungsausschluss**

Der Hersteller kann aber keine Gewährleistung übernehmen, ob das Produkt für den jeweiligen Eingriff geeignet ist. Dies muss der Anwender selbst bestimmen.

Wir können keine Haftung für zufällige oder sich ergebende Schäden übernehmen, wenn nachweislich gegen diese Gebrauchsanwendung verstossen wurde.



Wirz Ortho Mechanics, Bernstrasse 1, CH-3076 Worb, Tel: +41318324353; Fax +41318324354  
Mobile +41796306644, [www.wirz-ortho.ch](http://www.wirz-ortho.ch); [mechanik@wirz-ortho.ch](mailto:mechanik@wirz-ortho.ch)  
Swissmedic CH-201505-0035